



## Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија

+381 11 2067 100

[iors@ncrc.ac.rs](mailto:iors@ncrc.ac.rs) [www.ncrc.ac.rs](http://www.ncrc.ac.rs)

01-12-025/154017-3


26 DEC 2023

# ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА РАЗВОДА ГАСОВА

Ознака процедуре	<b>П.ТЕХ.05</b>
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015./15.12.2023.
Аутори процедуре	Драгослав Христов, маш.тех.
Носилац процедуре	Др Драгана Јовићевић
Процедуру одобрио	Доц. др Милан Јовић



173244

 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре: <b>Процедура одржавања инсталација развода гасова</b>		Ознака: <b>П.ТЕХ.05</b>
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

## 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС=Институт за онкологију и радиологију Србије

СТП=Служба за техничке и друге послове

## 2. ПРЕДМЕТ

Процедуром се дефинише начин руковања и одржавања инсталације развода гасова.

## 3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује од стране запослених у Службе за техничке и друге послове ИОРС.

## 4. ОДГОВОРНОСТИ

Техничар на одржавању подстанице медицинских гасова одговоран је за:


- Спровођење правилног и безбедног руковања опремом на инсталацијама за развод гасова
- Спровођење обуке кадрова за руковање опремом и инсталацијама у ИОРС.

## 5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

### Дневно одржавање инсталације развода гасова (Д):

Д1 Контролише се дневни утрошак гасова, уколико је већи од просечног контролишу се спојеви и прикључци.

Д2 Отклања се узрок цурења гаса на споју или прикључку

 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре: <b>Процедура одржавања инсталација развода гасова</b>		Ознака: <b>П.ТЕХ.05</b>
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

**Недељно одржавање инсталације развода гасова (W):**

- W1 Празне боце се припремају и шаљу на пуњење.
- W2 Пуне боце се контролишу и стављају у магацин.
- W3 Боце са неисправним вентилом се уз записник враћају испоручиоцу гасова.

**Годишње одржавање инсталације развода гасова (A):**

- A1 Врши се сервис компресора за ваздух уз замену вентила и филтера
- A2 Детаљан преглед целе инсталације
- A3 Мења се искривљена, згњечена или зарђала инсталација.
- A4 Обезбедити овлашћени сервис